

MONTERING AV UPS PÅ 3SHAPE TRIOS MOVE+

Denna instruktion beskriver hur UPS/batterienhet monteras på en MOVE+.

Unident IOS-support finns tillgänglig för assistans vid behov på
tel. 0346-73 24 25 / ios@unident.se

STEG 1

Packa upp samtliga tillbehör
som består av följande:



- 4 st klossar
- 4 st skruvar



- 1 st UPS



- 1 st Bas



- 1 st Framsida



- 1 uppsättning sladdar

*We'll back
you up*

 **UNIDENT®**


STEG 2

Avlägsna plastfilmen från bas och framsida.

STEG 3

Montera klossarna på stolpen.

- a) Klossen med större hål sitter mot basen, klossen med mindre hål sitter bortåt från basen.
- b) Skruvarna fäst genom basen, genom klossen med stora hål och skruvas in i klossen med små.
- c) Kontrollera att lådan blir rak innan skruvarna dras åt helt, undvik att överdra.

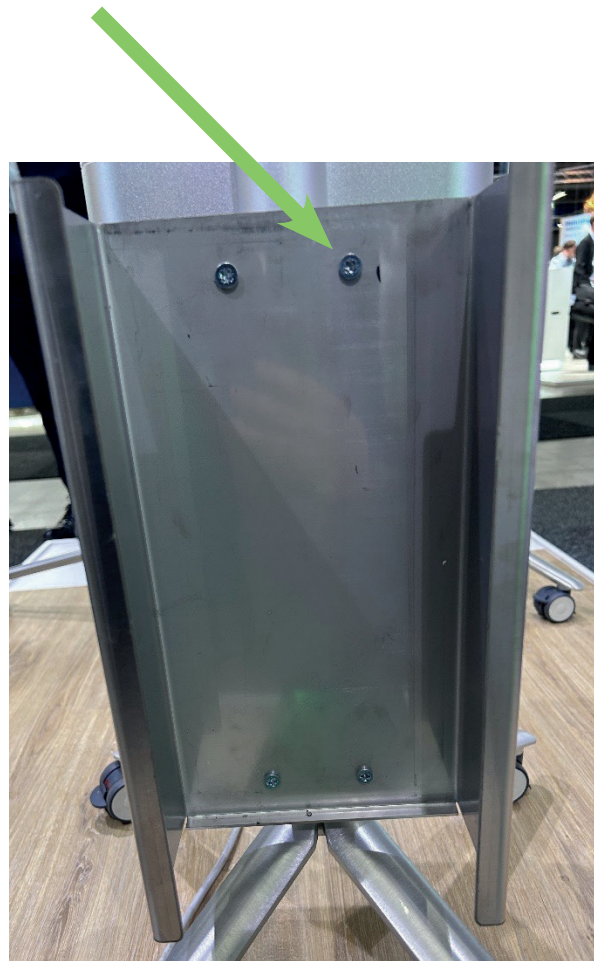

*We'll back
you up*

STEG 4

Lossa plasten och sätt sedan i UPS-enheten i basen när denna är fäst på stolpen.



STEG 5

Sätt den långa, gråa strömkabeln från MOVE-vagnen in i UPS-enheten.
Koppla in strömsladden i väggen.
Håll sedan in PÅ-knappen ett par sekunder tills det hörs ett pip.



KABELINGÅNG

PÅ-KNAPP

*We'll back
you up*

 UNIDENT®

STEG 6

Montera framsidan, denna kan vickas lite fram och tillbaka så att den kommer på plats hela vägen ner. Den svarta kabeln kopplas från framsidan in i MOVE-ställningen.



KLART!

Grattis till monteringen av UPS-enheten!

Batteriet ger ström i ca 15 min utan strömsladd och är endast avsedd för förflyttning mellan behandlingsrum, scanning får aldrig utföras utan strömsladden inkopplad i väggen.

Det är rekommenderat att låta strömsladden vara inkopplad även när maskinen är avstängd eller inte används för att säkerställa att batteriet är fulladdat.

*We'll back
you up*

