

CHOICE™ 2

Veneer Cement

ALLMÄN INFORMATION

CHOICE 2 L/C är ett färgstabil, ljushärdande kompositcement med hög tryckhållfasthet som utvecklats speciellt med avsikt på cementering av porslins-, litiumdisilikat- eller indirekta kompositfasader.

CHOICE 2 vattenlösliga **TRY-IN PASTE** finns tillgängliga separat och kan användas för att visualisera och förutbestämma det slutgiltiga estetiska resultatet.

Användningsområden:

Cementering av porslins-, litiumdisilikat-, komposit- eller zirkoniafasader

Avsedd användare: Legitimerad tandläkare

Kontraindikationer:

Använd inte ALL-BOND UNIVERSAL® till patienter som tidigare uppvisat allvarlig allergisk reaktion mot metakrylatresin.

Varningar:

- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®, och BIS-SILANE™* är mycket brandfarliga.
- Fluorvätesyra är en mycket stark och aggressiv kemikalie. Använd inte denna produkt förrän du noggrant genomläst och förstått bruksanvisningen för PORCELAIN ETCHANT* (9.5% HF)
- Undvik stänk i ögonen. Om någon produkt kommer i kontakt med ögonen spola rikligt med vatten och sök medicinskt omhändertagande.
- Fosforsyran i etsmedlet irriterar ögon och hud kraftigt. Skada kan uppstå om etsmedlet får kvarstanna på hud eller slemhinna under längre tid. Om ögonstänk skulle uppstå, spola rikligt med vatten och sök medicinskt omhändertagande omedelbart. I händelse av kontakt med andra vävnader spola omedelbart med mycket vatten i flera minuter.
- När dentaladhesiver används, orsakar salivkontamination en allvarlig försämring av dentinbindningen och kan resultera i att ersättningen får försämrade hållbarhet. Kofferdamanvändning rekommenderas till alla direkta ersättningar och andra indikationer där risk för kontamination är möjlig.

Observanda:

- Kors-kontamination: Produkt kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade tillbehör. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.

Försiktighetsmått:

- Använd ALL-BOND UNIVERSAL eller ALL-BOND 3 omedelbart så snart det lagts upp i blandningskopp, exponering för luft och ljus kan resultera i avdunstning av lösningsmedel och förtjockning av adhesiven.
- Undvik hudkontakt; opolymeriserat resin kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga individer. Vid kontakt, tvätta huden med tvål och vatten.
- Använd inte väteperoxid, EDTA eller eugenolhaltiga material inför den adhesiva åtgärden då dessa material kan förhindra att bindning uppstår.
- Skyddsglasögon bör bäras av patienten och tandvårdspersonalen.
- Eftersom keramer och porslin uppvisar stor variation är det viktigt att förhöra sig hos tillverkaren eller ditt laboratorium för korrekta anvisningar vad gäller ytbehandling och korrekt utformning innan **CHOICE 2** används.
- Ljusledarens spets på härdningslampan skall hållas så nära och rakt mot resinytan som är möjligt. Om en stor yta med resin ska ljushärdas är det lämpligt att dela in denna i flera sektioner och ljushärda varje sektion separat.
- Om ZOE-innehållande material använts på tandsubstansen under de senaste 2-3 veckorna, rengör tandytan på ett adekvat sätt med ett abrasiv före adhesivanvändning.
- Otillräcklig luftintorkning av adhesiven leder till att lösningsmedlet inte avdunstas fullständigt och kan resultera i försämrade bindningsstyrka och postoperativ överkänslighet.
- Förvara inte UNI-ETCH®* i direkt solljus.
- Låg ljushärdningsintensitet ger upphov till dålig bindning.
- Överskottsansamling av adhesiv kan resultera i att den definitiva ersättningen inte kommer riktigt på plats.
- Hänvisning görs till enskilda komponenters märkning för särskilda utgångsdatum.
- Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- Säkerhetsdatablad finns på www.bisco.com

BRUKSANVISNING

CEMENTERING AV FASADER Förberedelse av fasad och inprovning:

A. PORSLINS- ELLER LITIUMDISILIKATFASADER

OBS: Kontrollera att porslinsfasaderna har blivit korrekt etsade eller etsa fasaderna med fluorvätesyra i enlighet med tillverkarens anvisningar (t ex med 9.5% PORCELAIN ETCHANT*).

1. Lägg på 1-2 skikt silan (När BIS-SILANE™ 2-komponents silanprimer används, blanda del A och B i förhållandet 1:1) på fasadernas insidor. Vänta 30 sekunder och lufttorka med luftblåster.

OBS: Den silanprimerbehandlade porslinsytan kommer att se likadan ut efter, som före silaniseringen.

2. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs, spola och torka.

3. Prova in de silanbehandlade fasaderna på tänderna för att kontrollera passform. Applicera önskad färg av **CHOICE 2 TRY-IN PASTE** inprovningspasta i fasaden och sätt försiktigt på plats. **OBS:** TRY-IN-PASTE härdar inte men matchar den korresponderande cementfärgen.
 4. När önskad **CHOICE 2** färg fastställts, avlägsna fasaderna och rengör både tanden och fasaden med vatten. Fasaden bör spolas noggrant ren med vatten eller använd en rengöringsgel, t ex ZirClean®.
 5. Fortskrid med cementering.
- B. KOMPOSITFASADER**
1. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs. Spola och torka.
 2. Prova in kompositfasaderna på tänderna för att kontrollera passformen. Applicera önskad **CHOICE 2 TRY-IN PASTE** inprovningfärg i fasaden och sätt försiktigt på plats på tänderna. **OBS:** TRY-IN PASTE härdar inte men matchar den korresponderande cementfärgen
 3. När önskad **CHOICE 2** färg fastställts avlägsna fasaderna och rengör både tanden och fasaden med vatten. Fasaden bör spolas noggrant ren med vatten (eller idealt i ultraljudsbad i destillerat vatten eller etanol/isopropylalkohol i 2-3 minuter) och sedan torkas).
 4. Gör lätt sandblästring av fasadens insida i 1-2 sekunder. Spola och torka.
 5. Fortskrid med cementering.
- C. ZIRKONIAFASADER**
- OBS:** Tillse att zirkoniafasaderna blivit korrekt sandblästrade eller sandblästra fasadernas interna ytor enligt tillverkarens anvisningar.
1. Applicera 1-2 skikt zirkoniaprimer i fasaderna (såsom Z-PRIME Plus™) och låt verka i 30 sekunder. Lufttorka. (**OBS:** Den primerbehandlade zirkoniytan kommer att se likadan ut efter, som före primerbehandlingen.
 2. Rengör tandpreparationen. Spola och torka.
 3. Prova in de primerbehandlade fasaderna på tänderna för verifiering av korrekt passform. Applicera önskad **CHOICE 2 TRY-IN PASTE** inprovningfärg i fasaden och sätt försiktigt på plats på tänderna. **OBS:** TRY-IN PASTE härdar inte men matchar den korresponderande cementfärgen
 4. När önskad **CHOICE 2** färg fastställts, avlägsna fasaderna och rengör både tanden och fasaden med vatten. **OBS:** För den händelse ytan inte har förbehandlats med primer, rengör ytan med en rengöringsgel såsom t ex ZirClean® för att avlägsna kontamination. Spola med vattenspray och lufttorka med oljefri luft. Applicera sedan primer enl steg 1.
 5. Fortskrid med cementering.

TANDFÖRBEREDELSE:

1. Rengör tandpreparationen. Spola och torka.
2. Isolera tandpreparationerna.
3. Etsa emalj och dentin med fosforsyra (t ex Uni-Etch 32% fosforsyra) i 15 sekunder. Spola noggrant och avlägsna överskottsvatten men torka inte ut; tandpreparationen ska se synligt fuktig ut.
4. Applicera adhesiv enligt tillverkarens anvisningar:
ALL-BOND UNIVERSAL ANVÄNDARE: Applicera två separata skikt med ALL-BOND UNIVERSAL. Varje skikt ska gnuggas in i preparationen med Quick-stick mikroborste i 10-15 sekunder. Ljushärda inte mellan skikten. Avdunsta lösningsmedel genom noggrann intorkning med luftbläster i minst 10 sekunder; adhesiven ska inte ses kunna röra sig. Ytan ska ha ett jämnt, glansigt utseende; annars applicera ytterligare ett skikt med ALL-BOND UNIVERSAL och torka in. Ljushärda i 10 sekunder.
5. Avlägsna matrisbandet eller plaststripet.
ALL-BOND 3 ANVÄNDARE: Blanda Part A och B i förhållande 1:1 och applicera i direkt följd 1-2 skikt på preparationen. Torka noggrant men försiktigt för att avdunsta lösningsmedel. Ytan skall se blank ut; om inte applicera ytterligare ett skikt med ALL-BOND 3 och lufttorka. Ljushärda i 10 sekunder.

CEMENTERING:

1. När det gäller fasader i porslin eller litiumdisilikat kan du om så önskas applicera ett mycket tunt skikt med HEMA-fritt resin, som t ex PORCELAIN BONDING RESIN* på fasadens insida LJUSHÄRDA I SÅ FALL INTE.
2. Applicera frikostigt med utvald färg av **CHOICE 2** fasadement, på fasadens insida. (*Anm Hultén & Co: Önskas tunnare konsistens kan Choice 2 tunnas ut med en mindre mängd Porcelain Bonding Resin.*)
3. Placera fasaden och för försiktigt på plats.
4. Ljushärda vardera fasad i 3-5 sekunder för att fixera fasaderna på plats.
5. Avlägsna överskottscement.
6. Ljushärda vardera fasad i 40 sekunder från lingualytan och 40 sekunder från facialytan.

HYGIEN: Återförslut sprutor med luer lock-hättan. Användning av vanligen förekommande hygienskydd rekommenderas för att undvika att sprutorna kontamineras under behandling.

AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro av sådana, följ nationella eller regionala avfallshanteringsföreskrifter.

FÖRVARING: Förvara i rumstemperatur (20°C-25°C).

GÄRANTIER: Bisco Inc. åtar sig skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. åtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren åtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.

Anmärkning: Rapportera alla biverkningar till BISCO och den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig. Sammanfattning av säkerhet och kliniska prestanda finns på <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> eller tillhandahålls på begäran.

*CHOICE och BIS-SILANE är varumärken som tillhör Bisco Inc. ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL, ZIRCLEAR och UNI-ETCH är registrerade varumärken som tillhör Bisco Inc. PORCELAIN ETCHANT och PORCELAIN BONDING RESIN tillverkas av BISCO Inc.