



# Rengöring och desinficering

## iTero

### 1. Kassera förbrukad sleeve

Kassera använd sleeve enligt lokala rutiner för kontaminerat avfall.

### 2. Rengöring av scanner och skärm

Rengör hela scannern, inklusive handstycke och skärm, med CaviWipes<sup>1</sup> i minst 1 minut.

Ytor ska hållas fuktiga under hela kontakttiden.

### 3. Rengöring av lins

Fukta en luddfri bomullstork med 70% etanol (ej droppande) och torka linsen en gång tills den är visuellt ren.

Låt lufttorka 5–10 sekunder. Ev tensidhinna kan därefter försiktigt torkas med torr fiberduk som finns i varje paket med sleeves.

### 4. Klart för nästa patient

Sätt på skydds-sleeve tills nästa patient.

