

MEDIT

Rengöring och desinficering Medit i900

1. Rengöring av scanner

Stäng av scannern innan rengöring.

Rengör hela scannern med CaviWipes1 i 1 minut.
Undvik att torka över linsen/optiska fönstret

2. Scannerspets – rengöring och desinfektion

Torka av scannerspetsen med CaviWipes1 i 1 minut.

Skölj därefter av spetsen med vatten.

Packa spegelområdet med 100% bomullsgasväv för att undvika vattenfläckar.

Placera scannerspetsen i en autoklavpåse och förslut lufttätt.

3. Autoklivering

Följ tillverkarens rekommenderade parametrar:

Autoklivering klass B program: 134°C i 4 minuter,
torktid 20 minuter.

4. Viktigt att tänka på

Spegelområdet är ett känsligt optiskt element
– repor påverkar scanningskvalitet.

Tippar kan steriliseras upp till 150 gånger enligt tillverkaren.

Medit ansvarar ej för skador om proceduren inte följs.

