


3M Science.
Applied to Life.™

3M Sterilisering

3M™ Comply™ SteriGage™ 1243

Kemisk integrator för ångsterilisering

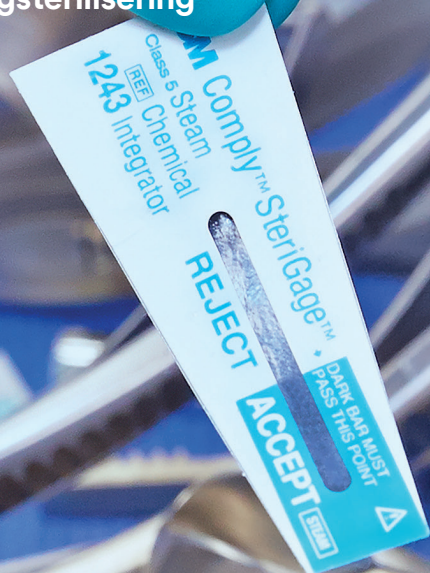

3M™ Comply™ SteriGage™ 1243

Kemisk integrator för ångsterilisering

3M™ Comply™ SteriGage™ 1243 Kemisk Integrator för ångsterilisering är en kemisk indikator bestående av en pappersveke och en ång- och temperaturkänslig kemisk tablett som är fastsatt i ett papper/film och papper/film/folielaminat. Den kemiska tabletten smälter och rör sig som en mörk färg längs med pappersveken. Denna vandring är synlig genom ett fönster som är märkt ACCEPT eller REJECT. Omfattningen av denna förändring beror på ånga, tid och temperatur.

Användningsområden

Comply™ SteriGage™ 1243 Kemisk Integrator för ångsterilisering används som förpackningskontroll vid processerna 121°C och 134°C.

Comply™ SteriGage™ 1243 Kemisk Integrator för ångsterilisering kan med fördel användas som komplement till biologisk indikator.

Bruksanvisning

1. När förpackningen skall öppnas första gången bör man använda sax för att klippa längs markeringen överst på folieförpackningen för att bevara så mycket som möjligt av förpackningen för att sedan kunna försegla den. Tag endast ut önskat antal Comply 1243 Kemiska Integratorer för ångsterilisering och tillslut påsen igen genom att vika den öppna änden minst två gånger.
2. Placera en Comply™ SteriGage™ 1243 Kemisk Integrator för ångsterilisering i varje förpackning, påse eller bricka som skall ångsteriliseras. Placera en kemisk integrator i varje hörn eller i minst två motsatta hörn av en container, eller i det område som är mest svårtillgängligt.
3. Utför sterilisering enligt etablerade rutiner.
4. Efter avslutad behandling bör den mörka färgen ha nått ACCEPT-fönstret på Comply™ SteriGage™ 1243 Kemisk Integrator för ångsterilisering. Om den mörka färgen inte har nått ACCEPT-fönstret, visas resultatet som REJECT, vilket betyder att föremålen i förpackningen, påsen, brickan eller containern inte har utsatts för tillräcklig ångsterilisering. Dessa föremål måste returneras för omsterilisering.

Förvaring och hållbarhet

Oöppnade och förseglade förpackningar med Comply™ SteriGage™ 1243 Kemiska Integrator för ångsterilisering skall förvaras på en torr plats (<50% relativ fuktighet) vid rumstemperatur (15-30°C).

Comply™ SteriGage™ 1243 Kemisk Integrator för ångsterilisering kan i oöppnad förpackning förvaras i upp till fem år från tillverkningsdatumet, vid förvaring under rekommenderade förhållanden. Utgångsdatumet är tryckt på förpackningens etikett.


Beställningsinformation

3M™ Comply™ SteriGage™ 1243

Art nr	Produktinformation	Storlek	Antal/fp	Fp/lev fp
1243A	3M™ Comply™ SteriGage™ utan förlängare	5,1 × 1,9 cm	500	2
1243B	3M™ Comply™ SteriGage™ utan förlängare	5,1 × 1,9 cm	100	10
1243RE	3M™ Comply™ SteriGage™ med förlängare	22,9 × 1,9 cm	500	2



Ikke genomgått ångsterilisering

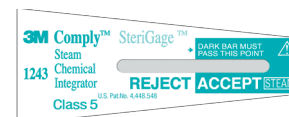

Genomgått godkänd ångsterilisering (Accept)



Genomgått ikke godkänd ångsterilisering (Reject)



3M Svenska AB
Infection Prevention Division
Bollstanäsvägen 3
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
www.3M.se/IPD

3M, Comply, "Science. Applied to Life" och SteriGage är varumärken inom 3M Company. © 3M 2017. Alla rättigheter reserverade. PL531225-1SE171114