

### Användarinstruktion

## BladeFLASK olika delar

BILD:  
VISAR HUR EGGEN PÅ  
SKALPELLEN SKA VÄNDAS

DENNA DEL AV  
SKALPELLEN  
KALLAS KNIVBLAD

RÄKNARE

INSTICKSLUCKA




MONTERINGSFÄSTE

## Fästanordning för vägg eller vagn

1. Om du inte har monterat din Blade FLASK tidigare, förbered fästanordningen\*

A FÄSTET HAR  
DUBBELHÄFTANDE TEJP

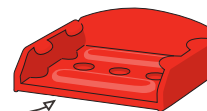

B ALT. ANVÄND SKRUVAR



\* SE MONTERINGSMALL OCH  
INSTRUKTIONER INUTI FÄSTETS  
FÖRPACKNING.

2. BladeFLASK kan monteras på vägg eller på en vagn eller bänk.



FÖR NER I  
FÄSTET




FÖR TILLBAKA  
IN TILL  
FÄSTET


OBS: BladeFLASK  
ska vara monterat på  
monteringsfästet innan  
användning.

## Ta bort Skalpellblad ENHANDS FATTNING:

1. Placera bladet på insticksplattan med den vassa kanten vänd åt höger.

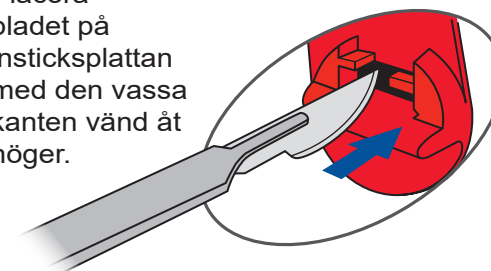


2. Tryck in skalpellhandtaget i BladeFLASK tills du hör ett klick.

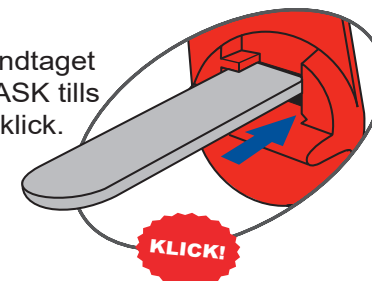

KLICK!

3. Ta bort handtaget.

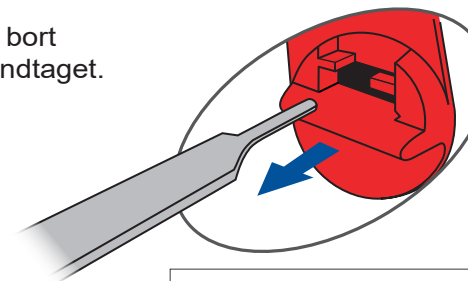

OBS: BladeFLASK kasseras  
som medicinskt avfall efter att  
100 blad har satts in.