

7.0 Inspektion



FÖRSIKTIGHET

Kontrollera produkten före varje användning efter synliga skador.
Använd inte en skadad produkt!

Strålskydd ska kontrolleras regelbundet, minst var tredje månad för att säkerställa ett fullgott skydd. Revor, tydligt synliga veck, framskjutande eller ojämna områden är alla tecken på defekter.

Vi rekommenderar att strålskyddskläder undersöks enligt standarden DIN 6857-2:2016. Detta inkluderar en fluoroskopisk röntgenundersökning med regelbundna intervall utöver en regelbunden visuell och taktill undersökning.

Vänligen kontakta oss vid ett misstänkt fel:

Telefon +49 (0) 89/420 96 - 0
Fax +49 (0) 89/420 96 - 200
e-post info@mavig.com

8.0 Rengöring och desinfektion

ANMÄRKNING: *Bristande hygien kan leda till infektioner hos patienter, operatörer/användare eller tredje parter.
Rengör och desinficera därför enligt gällande föreskrifter.*

Följande märkningar gäller för strålskyddande produkter:



Tvätta
ej



Får ej
blekas



Strykes
ej



Torktumlas
ej



Kemtvättas
ej



Våtrengör
ej



Ej steriliserbar

8.1 Rengöring



WARNING – Skada på produkten

Undvik skador på produkten genom att inte använda några aggressiva, sträva eller korrosiva medel (t.ex. förtunning, aceton, skurmedel).

RP270, RP271, RP274, RP276 (set i storlek G), **RP643, RP648, RP664, RP668, RP679, RP689, RD614, RD635, RD642, RD644, ST-FS, ST-RZ, ST-ER:**

Färska fläckar kan vanligtvis avlägsnas från strålskyddskläderna med tvålatten med en temperatur på ca 20 °C och en mjuk trasa. För svåra fläckar rekommenderas en 10 % lösning av natriumtiosulfat i vatten. Använd kallt vatten för vätskor som innehåller proteiner (som blod). Säkerställ att trasan är fuktig och inte blöt.

RP278, RP276 (storlekarna E och K), **RP280:**

Avlägsna lättare fläckar med ljummet tvålatten och en mjuk trasa. Vid svårare fläckar, avlägsna med en linneduk doppad i alkohol och skölj med rent vatten.

8.0 Rengöring och desinfektion

8.2 Desinfektion

Produkten ska alltid rengöras enligt beskrivningen i kapitel 8.1 "Rengöring" innan desinfektion.



VARNING – Produktprestation och ytskador

Kombinerad användning av olika desinfektionsmedel och/eller desinfektionsmedel med rengöringsmedel kan påverka produktens prestanda eller skada produktens ytskikt.

RP270, RP271, RP274, RP276 (set i storlek G), **RP643, RP648, RP664, RP668, RP679, RP689, RD614, RD635, RD642, RD644, ST-FS, ST-RZ, ST-ER:**



VARNING – Skada på produkten

Använd inte alkoholbaserade desinfektionsmedel, ren alkohol (t.ex. etanol och isopropanol) eller oxiderande samt aktivt klor- eller salthaltiga desinfektionsmedel eftersom de angriper ytan på det yttre materialet starkare än desinfektionsmedel baserade på andra kemikalier.

Undvik att applicera för hårt tryck under desinficering. För att bevara egenskaperna hos våra strålskyddskläder rekommenderar vi att du använder följande desinfektionsmedel. Observera nedanstående instruktioner:

- De tester som utförs på vårt företag motsvarar inte några certifierade eller standardiserade testförfaranden, därför kan vi inte utfärda ett meddelande, utan endast en rekommendation.
- Eftersom vi inte har något inflytande över desinfektionsmedlets produktion eller ingående råvaror kan vi inte utfärda någon som helst garanti för skyddsklädernas motståndskraft mot desinfektionsmedlet.
- Ytdesinfektionsmedlets effektivitet har inte beaktats. Anvisningarna för användningen av desinfektionsmedlet måste följas.
- På grundval av ovanstående orsaker utesluter MAVIG alla garantier eller ansvaret för påföljande skador.

Desinfektionsmedel	Tillverkare	Aktiva substanser
Microbac forte	BODE Chemie GmbH	Kvartära föreningar, alkylaminderivat
Kohrsolin FF	BODE Chemie GmbH	Aldehyd, kvartära föreningar
Antifect FF	Schülke & Mayr GmbH	Kvartär förening, aldehyd
Microzid Sensitive Wipes	Schülke & Mayr GmbH	Kvartära föreningar
Microbac Tissues Solution	BODE Chemie	Kvartära föreningar

I allmänhet ska man vid valet av desinfektionsmedel se till att det innehåller så få alkoholer som möjligt. Helst ska de första 5 ingredienserna inte vara alkoholer eller dessa vara angivna med mängder som "<5 %".

Om du har ytterligare frågor om desinfektionsmedel eller om din klinik inte tillåter de desinfektionsmedel som anges ovan är du välkommen att kontakta oss:

Telefon +49 (0) 89/420 96 - 0

e-post info@mavig.com

8.0 Rengöring och desinfektion

8.2 Desinfektion

RP278, RP276 (storlekarna E och K), **RP280**:

Använd desinfektionsmedel som är lämpliga för PVC eller PU och som normalt används inom sjukvården. Skölj med rent vatten. Undvik att trycka för hart när desinfektionsservetter används.

9.0 Säker avyttring

Produkten måste avyttras enligt gällande nationella föreskrifter hos en lämplig återvinningsstation.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor via:

Telefon +49 (0) 89/420 96 - 0
e-post info@mavig.com