



## DAX Ytdesinfektion Extra

DAX Ytdesinfektion Extra är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. samt metallföremål. DAX Ytdesinfektion Extra är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.

### Fördelar med DAX Ytdesinfektion Extra

- Uppfyller standarden EN 13697 och har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och höljeförsedda virus
- Innehåller korrosionsskydd
- Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
- Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan eller på metallföremålet
- Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas

### Gör så här

#### Ytor

- Dränk in en torkduk med utspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.
- Bearbeta ytan upprepade gånger.
- Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverknings tiden och låt lufttorka.
- Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontakttiden (se sidan 2 för kontakttid).

#### Metallföremål

- Torka bort organiskt material såsom t.ex. blod från föremålet.
- Lägg ner föremålet i utspätt medel och låt ligga i minst 1 minut.



Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfektion Extra 1000 ml	470-12	7331964004708	12
DAX Ytdesinfektion Extra 3000 ml	471-3	7331964004716	3

# DAX Ytdesinfektion Extra

## Mikrobiologisk information

### Bactericidal effekt

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 60 sek  
Staphylococcus aureus 60 sek  
Enterococcus hirae 60 sek  
Escherichia coli 60 sek

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa 60 sek  
Staphylococcus aureus 60 sek  
Enterococcus hirae 60 sek  
Escherichia coli 60 sek

### Yeasticidal effekt

EN 13624 Candida albicans 5 min

EN 13697 Candida albicans 60 sek

### Mycobactericidal effekt

EN 14348 Mycobacterium terrae 60 sek  
Mycobacterium avium 60 sek

### Virucidal effekt

EN 14476 Adenovirus 5 min  
Human Rotavirus 2 min

DVBV/RKI\* Bovine viral diarrhoea(BVDV) 30 sek (surrogate of HCV)  
Vaccinia virus 30 sek

\*Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVBV) och Robert Koch-Institute (RKI).

## Innehåll:

- pH-värde ~7

## Typ av formulering

- Vätska

## Förpackningsmaterial

- Högdensitetspolyeten (HDPE)

Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfektion Extra 1000 ml	470-12	7331964004708	12
DAX Ytdesinfektion Extra 3000 ml	471-3	7331964004716	3