

USB-ingång

3Shape TRIOS MOVE+

Modellen 3Shape TRIOS MOVE+ har en USB-ingång på baksidan av skärmen. Om en lucka är placerad framför, så måste denna först monteras bort.



1. Använd Torx 6 mejseln som följer med TRIOS scannern.



2. Bakom luckan hittar du USB-ingången i överkant.

USB-ingång

3Shape TRIOS MOVE

We'll back
you up

 UNIDENT®

Modellen som saknar USB-ingång på baksidan av skärmen heter enbart MOVE.
För att komma åt en USB-ingång behöver den övre serviceluckan öppnas.
Detta gäller endast om handstycket är trådbundet.



1. Börja med att koppla från strömmen.



2. Den övre serviceluckan lokaliseras bakom luckan i bild. För att komma åt den måste de två övre skruvarna lossas med Torx 6-skruvmejseln.

Notera: Skruvarna behöver inte skruvas ut helt utan bara ca. 3-4 varv.



3. Dra locket i pilens riktning genom att placera tummarna på metallkanterna och pek-fingrar på locket baksida. Lyft sedan försiktigt locket uppåt så lossnar den.



OBS!
Placera tummarna på dessa galler – annars riskeras permanent skada på datorn.



4. Använd tillgänglig USB-ingång.

Önskas regelbunden tillgång till en USB-ingång – så kan en kort USB-sladd användas. Den finns en mindre glipa mellan locket och panelen (där skruvarna sitter) som möjliggör att sladden kan hänga ut.

 UNIDENT®

Kontakta vår Scanner-Support

Tel: **0346-73 24 50**

Mail: support@unident.se