

## TheraBase<sup>®</sup> Ca

Självbindande kalciumfrisättande bas/isolering

### Så här enkelt är det att använda TheraBase Ca

1. Rengör kaviteten med pimpstensputs
2. Montera en ny automixspets på dualsprutan
3. Tryck fram blandat **TheraBase Ca** och applicera i kaviteten
4. Ljushärda

Se vidare i bruksanvisningen för detaljer

### ALLMÄN INFORMATION

**TheraBase Ca** är en dualhärdande, kalciumfrisättande och självbindande bas/isolering. TheraBase Ca binder kemiskt till tandsubstans och frisätter kalcium. Det är radiopakt, vilket underlättar identifiering vid röntgenundersökningar.

**Avsedd användare:** Legitimerad tandläkare

**Användningsområden:**

- Bas eller isolering vid tandlagning.

**Varningar:**

- Undvik kontakt med huden. Opolymeriserat (met-)akrylat kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. I händelse av hudkontakt: tvätta med tvål och vatten.
- Saliv och orala vätskor kan allvarligt skada härdningen av det dentala bindemedlet.

**Försiktighet:**

**Korskontaminering:**

- Produkten kan innehålla delar som är avsedda för engångsbruk. Kassera använda eller förorenade spetsar. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.
- Användning av allmänt tillgängliga hygieniska skyddsöverdrag för att undvika eventuell kontamination av sprutor under behandling rekommenderas. Om sprutan blir kontaminerad, kassera den. Får inte rengöras eller desinficeras.

**Försiktighetsåtgärder:**

- Verknings- och bindningstider påskyndas i den varma intraorala miljön.
- Låt bli att använda material som innehåller peroxid, EDTA eller eugenol före bindningsproceduren eftersom dessa material kan hämma bindningen.
- Opolymeriserat resin kan orsaka hudsensibilisering på mottagliga personer. Undvik kontakt med huden. Vid hudkontakt: tvätta noggrant med tvål och vatten.
- För att förhindra polymerisering eller tilltäppning ska dualsprutans statiska blandningsspets lämnas kvar tills nästa applicering. Vid intraoral användning ska den torkas av med desinfektionsmedel innan den läggs undan för förvaring.
- Se märkning av individuella komponenter för specifika utgångsdatum.
- Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på begäran.
- Säkerhetsdatablad finns på [www.bisco.com](http://www.bisco.com).
- Bruksanvisning finns tillgänglig på begäran.
- Bruksanvisning finns tillgänglig via [www.bisco.com](http://www.bisco.com).

### TEKNISK INFORMATION

Arbetsstid: Minst 1 minut (inklusive blandning) vid 22 °C

Härdningstid: Högst 5 minuter vid 37 °C

Arbetsstid och härdningstid kan variera beroende på förvaringsförhållanden (temperatur, fuktighet)

## BRUKSANVISNING

### Förberedelseprocedurer

1. Vid pulpablotta rekommenderar BISCO att du använder TheraCal LC som överkappningsmedel.
2. Rengör preparationen med pimpsten och vatten. Skölj noggrant.
3. Avlägsna allt ytvatten genom att spruta luft på preparationen i tre till fem sekunder. Låt bli att torka ut. (Skydda preparationen mot kontaminering. I förekommande fall rekommenderar vi att du använder kofferdam.)

### Blandningsprocedurer

1. Ta av skyddshättan från dualsprutan.
2. Administrera en liten mängd material på ett blandningsblock för att eliminera eventuella luftbubblor i vardera kammare i dualsprutan.
3. Montera blandningsspetsen på dualsprutan genom att matcha den kilformade skåran på blandningsspetsen med motsvarande skåra på dualsprutan. Vrid den bruna låsningringen medurs.
4. Tryck på kolven för att blanda och applicera TheraBase Ca. (Se avsnittet "TEKNISK INFORMATION" för information om arbets- och härdningstid.)

### Bas-/isoleringsprocedurer

1. Applicera TheraBase Ca på dentinet i kaviteten direkt från dualsprutans kanylspets.
2. Ljushärda i 20 till 30 sekunder för att möjliggöra självhärdning. (Bara det att snabbt ljushärda kanterna kan vid självhärdning påskynda den slutliga bindningen.)

### ANVÄNDBARA TIPS

- **TheraBase Ca** som lämnats kvar på ett blandningsblock kan ge intrycket av att inte härda. Detta beror på syrehämning vid polymeriseringsprocessen. Var förvissad om att produkten kommer att polymerisera (binda) normalt i samband med tandlagning.

**HYGIEN:** Användning av allmänt tillgängliga hygieniska skyddsöverdrag för att undvika eventuell kontaminering av TheraBase Ca-dualsprutor under behandling rekommenderas.

**AVFALLSHANTERING:** Se allmänna bestämmelser angående avfallshantering. Om sådana saknas, se nationella eller regionala anvisningar angående avfall.

**FÖRVARING:** Förvara i rumstemperatur 20–25 °C

**GARANTI:** BISCO, Inc. erkänner sitt ansvar för att byta ut produkter om de visas vara felaktiga. BISCO, Inc. tar inte på sig något ansvar för skador eller förlust, vare sig direkt eller indirekt, som har sin grund i användningen eller oförmågan att använda produkterna enligt beskrivning. Det är användarens ansvar att, före användning, fastställa produktens lämplighet för den avsedda användningen. Användaren tar på sig alla risker och allt ansvar i samband därmed.

**OBSERVERA:** Rapportera alla allvarliga händelser till BISCO och den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

### FÖR BESTÄLLNING AV TILLBEHÖR:

X-81270P – kanylspetsar 20 gauge för automatisk blandning (30 st).

\* TheraBase och TheraCal