

3M ESPE

**Avtrycksmaterial till alla
alginat indikationer**



2.0mm
1.5mm
1.0mm

Position Penta /-Quick

33647858900810333645
785822628
746728

Indikationer

- Avtryck till framställning av provisorier
- Avtryck till studiemodeller
- Antagonistavtryck
- Avtryck till individuella skedar

Till alla alginat indikationer:

Position™ Penta™/-Quick

1. Avtryck till framställning av provisorier



Avtryck taget med Position Penta och Position Penta Quick kan slås ut och användas flera gånger. Det är alltså inte nödvändigt att ta ett nytt avtryck, om provisoriet frakturerar och skall göras om.


Den goda precisionen i materialet gör att provisoriet får en bra passform. Ytstrukturen i Position Penta/-Quick ger en blank yta på provisoriet och puts av provisoriets ocklusal-yta är ej nödvändig.

2. Avtryck till studiemodeller



Materialets dimensionsstabilitet gör att du oavsett utslagningstid, får en exakt detaljåtergivning av situationen i munnen. Du kan skicka avtrycket utan problem till ditt tandtekniska laboratorium. De hydrofila egenskaperna i en A-silikon, underlättar utslagningen då gipset lätt flyter ut i avtrycket.

3. Antagonistavtryck

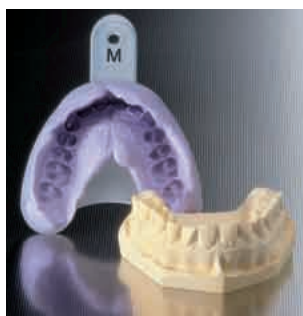

Ett bra antagonistavtryck är särskilt viktigt för ett bra resultat med laboratoriearbetet. Även till denna indikation är Position Penta och Position Penta Quick vägledande. Dosering av materialet från Penatamix™ maskinen är lätt och säkert, avtrycket blir exakt, lätt att avlägsna ur munnen, kan slås ut när du vill och gipsmodellen kräver minimal puts.

4. Avtryck till individuella skedar



Individuella skedar är nödvändiga vid applikation av blekningsmedel samt vid tillverkning av bettskenor. Dessa framställs utifrån en modell och här möjliggör Position Penta/-Quick's precision och dimensionsstabilitet framställning av en modell med god ytstruktur. Den blanka "icke porösa" ytan på modellen gör det lättare att arbeta vidare. Den goda elasticiteten i Position Penta/-Quick gör att du lätt kan ta bort avtrycket från modellen vid underskär och fristående tänder.

Fördelar med

Position™ Penta™/-Quick

Lätt att använda och hantera

Position Penta och den snabbare versionen Position Penta Quick ger Dig möjlighet att ta avtryck med ett A-silikon material, där Du annars skulle ha använt ett alginat material.

Du slipper därmed att:

- Fylla ut större underskär
- Våtförvaring av avtrycket i samband med leverans till Din tekniker
- Slå ut avtrycket med detsamma

Avtryck taget med Position Penta/- Quick är dimensionsstabilt och har låg permanent deformation.

Desinficering, sköljning och modellutslagning är inte beroende av tid. Avtrycken kan lätt sparas så länge som det är nödvändigt tills modellen är färdig, utan att kvaliteten försämras.

Utöver dessa fördelar kan avtryck med Position Penta eller Position Penta Quick slås ut flera gånger. Det är därför ej nödvändigt att ta nya avtryck eller flera avtryck för användning vid olika arbetsmoment på laboratoriet.

Pentamix™ systemet ger ytterligare fördelar

Med Pentamix systemet blandas Position Penta eller Position Penta Quick till en homogen och blåsfrä blandning. Systemet ger en homogen blandning, oavsett vem som använder Pentamix 2 maskinen.




Fördelar

- goda flytegenskaper
- hydrofilit
- lätt att ta ut avtrycket
- dimensionsstabilt
- blank / jämn yta
- lätt att desinficera
- god elastisk regeneration
- kan slås ut flera gånger


Arbets- och blandningstid

Position Penta Quick:

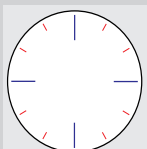

Arbetstid(inkl.blandning):	1 min. 10 sek
Stelningstid i munnen:	1 min. 30 sek
Total tid(från start av blandning):	2 min. 40 sek

Position Penta:

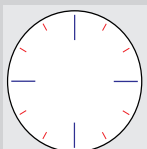

Arbetstid(inkl.blandning):	1 min. 30 sek
Stelningstid i munnen:	1 min. 30 sek
Total tid(från start av blandning):	3 min. 00 sek



29084



29034



29062



29012

Beställningsinformation - Position™ Penta™ / -Quick

Art.nr.: Innehåll:

29034	Introduktionskit Position Penta/ Position Penta tray	1 bas pasta 300 ml 1 katalysator 60 ml 1 position Penta materialbehållare 6 Position Penta skedar blandningsskruvar
29084	Introduktionskit Position Penta Quick/ Position Penta tray	1 bas pasta 300 ml 1 katalysator 60 ml 1 Position Penta Quick materialbehållare 6 Position Penta skedar blandningsskruvar
29012	Position Penta refill	2 x bas á 300 ml 2 x katalysator á 60 ml
29062	Position Penta Quick refill	2 x bas á 300 ml 2 x katalysator á 60 ml
77681	Position Penta materialbehållare	1 stk
77691	Position Penta Quick materialbehållare	1 stk
71512	Blandningsskruvar	50 st röda blandningsskruvar



3M Svenska AB
3M ESPE Dentalprodukter

Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: +46 8922100
Fax: +46 8922289
Internet: www.3mespe.com/se
e-post: 3msvenskaab@mmm.com

Tryckt i Sverige
© 3M 2006

3M, ESPE,
Position, Penta, Pentamix
ä alla varumärken för 3M eller
3M ESPE AG